

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی تجهیزات وسطوح
مختلف در اتاق عمل و ICU



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	آمبوبگ	آمبوبگها ابتدا آبکشی شده قطعات قابل جدا شدن را جدا کنید از یک محلول پاک کننده استفاده کرده سپس آبکشی و خشک شود سپس ضد عفونی سطح بالا شود پس از آبکشی و خشک شدن شیت شده (ماسک یکبار مصرف می باشد).
۲	الکتروکاردیوگراف	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه ولیدهای دستگاه با بعد از هر بار استفاده با اسپری سریع الاثر الکلی
۳	الکترو کوتر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی بعد از هر بار استفاده
۴	الکترو شوک	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه ولیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثر الکلی بعد از هر بار استفاده
۵	تخت احیاء نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی بعد از هر بار استفاده
۶	تخت عمل	شستشو با آب و مواد پاک کننده و ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی بعد از هر بار استفاده
۷	ترازو اطفال	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی
۸	چراغ سیالیتیک	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر غیر الکلی
۹	ساکشن	یکبار مصرف
۱۰	فشارسنج	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی - کاف دستگاه به صورت دوره ای شسته شود
۱۱	گلایدوسکوپ	شستشو تیغه دستگاه با آب و مواد پاک کننده و ضد عفونی کردن با محلول ضد عفونی ابزار (سطح متوسط) (بعد از هر بار استفاده)
۱۲	گوشی پزشکی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی روزانه
۱۳	لارنگوسکوپ	تیغه های لارنگوسکوپ ابتدا باید با آب سرد شسته شوند در محلول پاک کننده به مدت ۲ دقیقه غوطه ور شود پس از آبکشی و خشک شدن ضد عفونی کردن با محلول سطح بالا (غوطه وری به مدت ۱۵ دقیقه سپس شسته و خشک شود) در موارد بیماریهای سل - هیپاتیت وایدز تیغه های لارنگوسکوپ باید استریل شود. در آخر شیت شوند. ضد عفونی دسته با اسپری سریع الاثر
۱۴	ماشین بیهوشی	لوله ها یکبار مصرف ضد عفونی بدنه محلول ضد عفونی ابزار (سطح متوسط)
۱۵	مانومتر اکسیژن	پاک کردن با آب و دتر جنت سپس خشک شود.
۱۶	مانیتورینگ	دستمال کشی با اسپری سریع الاثر غیر الکلی
۱۷	نگاتوسکوپ	دستمال کشی با اسپری سریع الاثر الکلی
۱۸	وارمر نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکلی بعد از هر بار استفاده
۱۹	کاپنوگراف	دستمال کشی با اسپری سریع الاثر الکلی
۲۰	پالس اکسی متر	دستمال کشی با اسپری سریع الاثر الکلی

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی
تجهیزات و سطوح مختلف در
بخش زایشگاه زنان، زایمان



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	آمبویگ	آمبویگها ابتدا آبکشی شده قطعات قابل جدا شدن را جدا کنید از یک محلول پاک کننده استفاده کرده سپس آبکشی و خشک شود سپس ضد عفونی سطح بالا شود پس از آبکشی و خشک شدن شیت شده (ماسک یکبار مصرف می باشد).
۲	الکتروکاردیوگراف	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه ولیدهای دستگاه با بعد از هر بار استفاده با اسپری سریع الاثر الکی
۳	تخت زایمان	شستشو با آب و دترجنت سپس ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۴	الکترو شوک	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده ولید های مورد استفاده یکبار مصرف
۵	تخت احیاء نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۶	پمپ انفوزیون سرم	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۷	ترازو اطفال	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۸	چراغ سیالیتیک	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر غیر الکی روزانه
۹	ساکشن	شیشه های دستگاه با آب داغ ۹۰ درجه و مواد پاک کننده شستشو شده و سپس در محلول ضد عفونی سطح بالا قرار می دهیم.
۱۰	فشارسنج	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی
۱۱	وارمر نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۲	گوشی پزشکی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی روزانه
۱۳	لارنگوسکوپ	تیغه های لارنگوسکوپ ابتدا باید با آب سرد شسته شوند در محلول پاک کننده به مدت ۲ دقیقه غوطه ور شود پس از آبکشی و خشک شدن ضد عفونی کردن با محلول سطح بالا (قوطه وری به مدت ۱۵ دقیقه سپس شسته و خشک شود) در موارد بیماریهای سل - هیاتیت و ایدز تیغه های لارنگوسکوپ باید استریل شود. و در آخر شیت شوند. ضد عفونی دسته با اسپری سریع الاثر
۱۴	سنوگرافی	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی هفته ای پرپ بعد از هر بار استفاده با اسپری سریع الاثر الکی
۱۵	مانومتر اکسیژن	مخزن بعد از هر بار استفاده شسته می شود خشک می شود سوند بینی یکبار مصرف
۱۶	سونی کیت	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۷	NcT	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۸	دستگاه واکيوم	ضد عفونی بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی و اکیوم ها در اتوکلاو
۱۹	چراغ معاینه	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر غیر الکی روزانه
۲۰	تخت ژینکولوژی	ضد عفونی کردن دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی تجهیزات و سطوح مختلف در
بخش جراحی مردان، زنان، خصوصی، VIP



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	آمبویگ	آمبویگها ابتدا آبکشی شده قطعات قابل جدا شدن را جدا کنید از یک محلول پاک کننده استفاده کرده سپس آبکشی و خشک شود سپس ضد عفونی سطح بالا شود پس از آبکشی و خشک شدن شیت شده (ماسک یکبار مصرف می باشد).
۲	الکتروکاردیوگراف	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه و لیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی هفته ای
۳	اتوسکوپ	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۴	الکترو شوک	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده و لیدهای دستگاه یکبار مصرف
۵	تخت احیاء نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۶	ترازو بزرگ سال	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۷	ترازو اطفال	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۸	نگاتوسکوپ	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی روزانه
۹	ساکشن	شیشه های دستگاه با آب داغ ۹۰ درجه و مواد پاک کننده شستشو شده و سپس در محلول ضد عفونی سطح بالا قرار می دهیم.
۱۰	فشار سنج	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی
۱۱	وارمر نوزاد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۲	گوشی پزشکی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی روزانه
۱۳	لارنگوسکوپ	تیغه های لارنگوسکوپ ابتدا باید با آب سرد شسته شوند در محلول پاک کننده به مدت ۲ دقیقه غوطه ور شود پس از آبکشی و خشک شدن ضد عفونی کردن با محلول سطح بالا (غوطه وری به مدت ۱۵ دقیقه سپس شسته و خشک شود) در موارد بیماریهای سل - هیاتیت و ایدز تیغه های لارنگوسکوپ باید استریل شود. در آخر شیت شوند. ضد عفونی دسته با اسپری سریع الاثر
۱۴	پالس اکسی متر	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی هفته ای
۱۵	مانومتر اکسیژن	لیوان مرطوب کننده مانومترها پس از شستشو با آب و مواد پاک کننده شسته می شود و قسمتهای غیر قابل شستشو (فلوتر) با الکل ۷۰٪ ضد عفونی می گردد بعد از هر بار استفاده
۱۶	آفتالامسکوپ	شستشو با آب و مواد پاک کننده ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۷	بخور سرد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۱۸	فتوتراپی	ضد عفونی با اسپری سریع الاثر الکی
۱۹	گلوکومتر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۲۰	ونتیلاتور اطفال	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثر الکی بعد از هر بار استفاده
۲۱	مانیتورینگ	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه و لیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثر غیر الکی روزانه

واحد کنترل عفونت

واحد بهداشت محیط

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی تجهیزات وسطوح مختلف در
اورژانس



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	آمبویگ	آمبویگها ابتدا آبکشی شده قطعات قابل جدا شدن را جدا کنید از یک محلول پاک کننده استفاده کرده سپس آبکشی و خشک شود سپس ضد عفونی سطح بالا شود پس از آبکشی و خشک شدن شیت شده (ماسک یکبار مصرف می باشد).
۲	الکتروکاردیوگراف	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه ولیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثرالکلی هفته ای
۳	اتوسکوپ	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۴	الکترو شوک	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه ولیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۵	افتالموسکوپ	شستشو با آب و مواد پاک کننده ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۶	ترازو مکانیکی	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۷	ترازو اطفال	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۸	نگاتوسکوپ	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی روزانه
۹	ساکشن	شیشه های دستگاه با آب داغ ۹۰ درجه و مواد پاک کننده شستشو شده و سپس در محلول ضد عفونی سطح بالا قرار می دهیم.
۱۰	فشارسنج	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی
۱۱	اره گچ بری	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۱۲	گوشی پزشکی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی روزانه
۱۳	لارنگوسکوپ	تیغه های لارنگوسکوپ ابتدا باید با آب سرد شسته شوند در محلول پاک کننده به مدت ۲ دقیقه غوطه ور شود پس از آبکشی و خشک شدن ضد عفونی کردن با محلول سطح بالا (غوطه وری به مدت ۱۵ دقیقه سپس شسته و خشک شود) در موارد بیماریهای سل - هیاتیت وایدز تیغه های لارنگوسکوپ باید استریل شود. و در آخر شیت شوند. ضد عفونی دسته با اسپری سریع الاثر
۱۴	پالس اکسی متر	ضد عفونی کردن بدنه دستگاه با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۱۵	مانومتر اکسیژن	لیوان مرطوب کننده مانومترها پس از شستشو با آب و مواد پاک کننده شسته می شود و قسمتهای غیر قابل شستشو (فلوتر) با اسپری سریع الاثرالکلی ضد عفونی می گردد بعد از هر بار استفاده
۱۶	الکترو کوتر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۱۷	بخور سرد	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۱۸	گلوکومتر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی بعد از هر بار استفاده
۱۹	مانیتورینگ	ضد عفونی کردن بدنه و ولیدهای دستگاه با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای) روزانه

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی تجهیزات
 وسطوح مختلف در بخش آزمایشگاه



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	آب مقطر گیر (دیونایوز)	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۲	اتو آنالیزر بیوشیمی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۳	اتوکلادو	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۴	بنماری	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۵	الکترو لیت آنالیزر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۶	ترازو دیجیتالی	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۷	سانتری فیوژ	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۸	نگاتوسکوپسل کانتر	ضد عفونی کردن با اسپری سریع الاثرالکلی (هفته ای)
۹	فریزر بانک خون	شستشو شوی با اب ومواد پاک کننده هر هفته
۱۰	یخچال بانک خون	شستشو شوی با اب ومواد پاک کننده هر هفته
۱۱		

واحد کنترل عفونت

پاییز ۱۳۹۹

واحد بهداشت محیط

پاییز ۱۳۹۹

دستورالعمل شست و شو و ضد عفونی تجهیزات
وسطوح مختلف در بخش رادیولوژی



ردیف	نام دستگاه	طریقه شستشو
۱	رادیولوژی پرتابل	ضد عفونی کردن با اسپری الکل ۷۰٪ یا اسپری سریع الاثر روزانه
۲	رادیولوژی	ضد عفونی کردن با اسپری الکل ۷۰٪ یا اسپری سریع الاثر روزانه